

OneCheck 2019-nCoV IgG/IgM

TEST RAPIDO PER LA RILEVAZIONE DEGLI ANTICORPI DEL CORONAVIRUS 2019

CODICE: **TR184**

CONFEZIONE: **25 test**

CAMPIONE: **Sangue intero, siero, plasma**

METODO: **Immunocromatografico qualitativo**

TEMPO DI REAZIONE: **10 min**

CONSERVAZIONE: **4°C - 30°C**



DESCRIZIONE

Il test “OneCheck” 2019-nCoV IgG/IgM è un test rapido immunocromatografico a flusso laterale su card per la rilevazione degli anticorpi da Coronavirus 2019-nCoV (Sars-CoV-2) e come supporto per la diagnosi di **COVID-19** (Coronavirus Disease 2019).

Il test è in grado di rilevare qualitativamente e in maniera differenziata gli anticorpi IgG e IgM presenti nel campione. Può essere utilizzato indifferentemente sia su sangue intero che su siero o plasma, mediante prelievo venoso o anche periferico con l'ausilio di lancette pungidito (fornite gratuitamente con il kit a richiesta).


Il test è caratterizzato da una elevata accuratezza, semplicità di utilizzo, tempi analitici ridotti e costi contenuti rispetto ad altri metodi.

COMPOSIZIONE DEL KIT

- 25 card confezionate singolarmente
- 25 pipette
- 1 flacone di soluzione tampone
- 1 manuale d'uso

In abbinamento al kit è fornita una confezione di lancette pungidito e di salviettine disinfettanti

MODALITA' D'USO

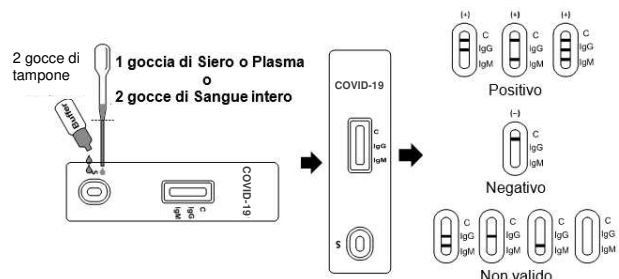

VANTAGGI

- Risultati in pochi minuti
- Semplicità d'uso
- Elevata accuratezza
- Costi contenuti
- Possibilità di utilizzo su sangue intero, anche mediante pungidito
- Nessuna attrezzatura aggiuntiva necessaria

PERFORMANCE DEL TEST

Questo test è stato confrontato con il metodo PCR.

Metodo	Risultati	PCR		Risultati totali
		Positivi	Negativi	
2019-nCoV IgG	Positivi	20	1	21
	Negativi	0	49	49
Risultati totali		20	50	70

Accuratezza: **98,6%**

Metodo	Risultati	PCR		Risultati totali
		Positivi	Negativi	
2019-nCoV IgM	Positivi	17	2	19
	Negativi	3	48	51
Risultati totali		20	50	70

Accuratezza: **92,9%**