

## OneCheck COVID-19 Ag

### TEST RAPIDO SU TAMPONE PER LA RILEVAZIONE DELL'ANTIGENE DEL SARS-COV-2

CODICE: **TR186**

CONFEZIONE: **20 test**

CAMPIONE: **Tampone nasofaringeo**

METODO: **Immunocromatografico qualitativo**

TEMPO DI REAZIONE: **15 min**

CONSERVAZIONE: **4°C - 30°C**



#### DESCRIZIONE

Il test "OneCheck" COVID-19 Ag è un test rapido immunocromatografico a flusso laterale su card per la rilevazione dell'antigene del Coronavirus Sars-CoV-2 come **supporto per la diagnosi di COVID-19 in pazienti con sintomi di infezione.**

Il test è in grado di rilevare qualitativamente e in pochi minuti la presenza del virus tramite il suo antigene in campioni da tampone nasofaringeo.

Non necessita di alcun tipo di attrezzatura in quanto è già tutto fornito all'interno del kit.


È sufficiente prelevare il campione dalla nasofaringe tramite l'apposito tampone, estrarre il campione all'interno delle apposite provette con soluzione di estrazione e versare una piccola quantità di soluzione sul dispositivo.

Il test è caratterizzato da una elevata semplicità di utilizzo, tempi analitici ridotti e costi contenuti rispetto ad altri metodi.

#### COMPOSIZIONE DEL KIT

- 20 card
- 20 tamponi sterili
- 20 provette di estrazione del campione
- 2 flaconi di soluzione di estrazione

#### MODALITA' D'USO

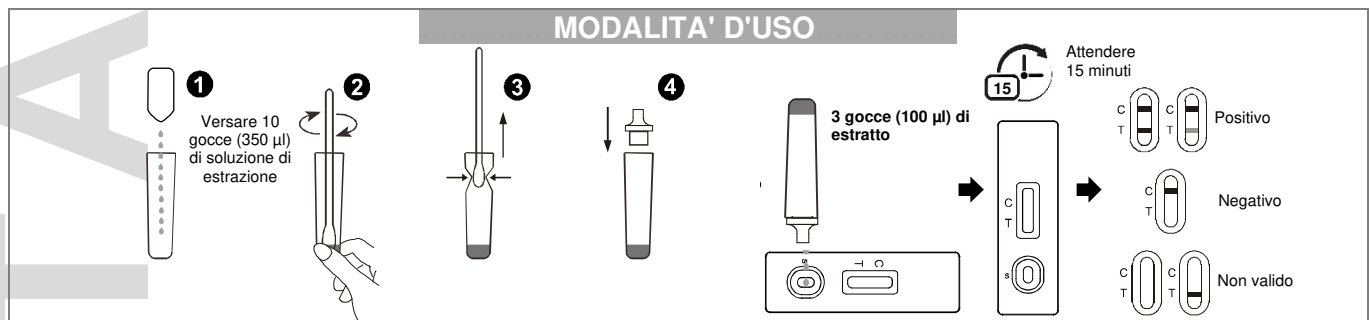

#### VANTAGGI

- Risultati in pochi minuti
- Semplicità d'uso
- Elevata accuratezza
- Costi contenuti
- Nessuna attrezzatura aggiuntiva necessaria

#### PERFORMANCE DEL TEST

Questo test è stato confrontato con il metodo PCR.

Metodo	PCR			Risultati totali
	Risultati	Positivi	Negativi	
COVID-19 Ag	Positivi	80	1	81
	Negativi	3	120	123
<b>Risultati totali</b>		83	121	204

Sensibilità relativa: 96,4%  
 Specificità relativa: 99,2%  
 Accuratezza: 98,0%