

OneCheck COVID-19 Ag SALIVA

TEST RAPIDO SU SALIVA PER LA RILEVAZIONE DELL'ANTIGENE DEL SARS-COV-2

CODICE: TR189

CONFEZIONE: 10 test

CAMPIONE: Saliva

METODO: Immunocromatografico qualitativo

TEMPO DI REAZIONE: 15 min

CONSERVAZIONE: 4°C - 30°C



DESCRIZIONE

Il test "OneCheck" COVID-19 Ag SALIVA è un test rapido immunocromatografico a flusso laterale su card per la rilevazione dell'antigene del Coronavirus Sars-CoV-2 come **supporto per la diagnosi di COVID-19 in pazienti con sintomi di infezione.**

Il test è in grado di rilevare, qualitativamente e in pochi minuti, la presenza del virus tramite il suo antigene in campioni di saliva.

Il test **non è invasivo** e non necessita di alcun tipo di attrezzatura in quanto è già tutto fornito all'interno del kit.


È sufficiente raccogliere il campione di saliva all'interno dell'apposita provetta, diluire il campione con la soluzione di estrazione e versare una piccola quantità di estratto sul dispositivo.

Il test è caratterizzato da una elevata semplicità di utilizzo, tempi analitici ridotti e costi contenuti rispetto ad altri metodi.

COMPOSIZIONE DEL KIT

- 10 card
- 10 pipette
- 10 provette con boccaglio
- 10 sacchetti per smaltimento dei campioni
- 10 fiale di soluzione di estrazione
- 1 portaprovette

MODALITA' D'USO

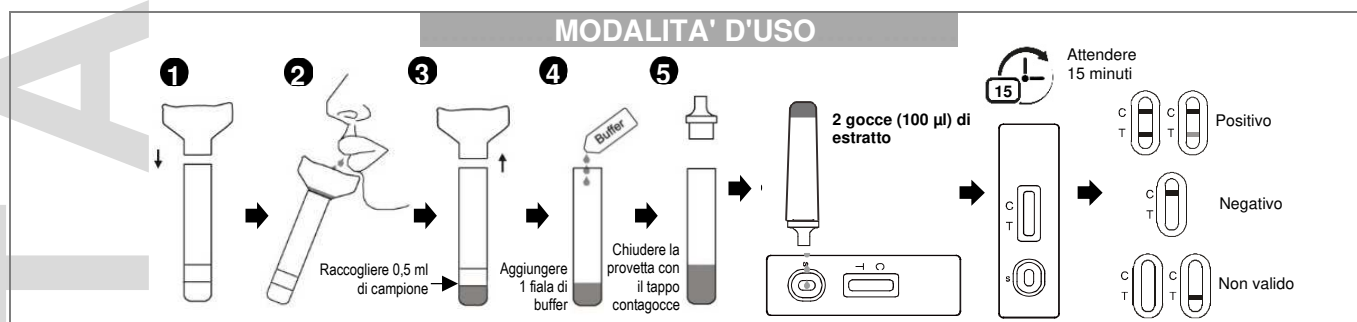

VANTAGGI

- Risultati in pochi minuti
- Costi contenuti
- Semplicità d'uso
- Nessuna attrezzatura aggiuntiva necessaria
- Non invasivo

PERFORMANCE DEL TEST

Questo test è stato confrontato con il metodo PCR.

Metodo	PCR			Risultati totali
	Risultati	Positivi	Negativi	
COVID-19 Ag	Positivi	91	2	93
	Negativi	10	303	313
Risultati totali		101	305	406

Sensibilità relativa: 90,1%
Specificità relativa: 99,3%
Accuratezza: 97,0%